

Cito-Fix Fijador Citológico

DESCRIPCION

Cito-Fix es una nueva combinación de fijadores cuidadosamente balanceados para lograr una perfecta fijación, tanto de las estructuras nucleares como citoplasmáticas.

Posee gran poder de penetración, para cortar los efectos de desecación de las muestras citológicas además de tener un rápido secado.

Apto para la fijación de cualquier tipo de extendido citológico como Papanicolau, punciones de mama, cepillados de órganos, improntas etc.



◇ MODO DE EMPLEO

- Efectuado el extendido, rociar de inmediato, dirigiendo la flecha de la válvula hacia el portaobjeto desde una distancia aproximada de 20 cm.
- Es recomendable 2 a 3 rocíos cortos por extendido citológico. Si la muestra es muy abundante (sea por celularidad, mucus, sangre, exudado etc.), repetir la acción.
- Dejar secar en posición horizontal por algunos minutos.
- Una vez seco, se puede teñir o guardar indefinidamente protegido del polvo y la luz.

◇ PRECAUCIONES

- Se recomienda ántes de empezar la tinción, retirar el exceso de fijador lavando las laminas en agua corriente.
- En caso de afectar ojos, mucosa o piel sensible, lavar con abundante agua corriente.
- Si el envase permanece por semanas o meses estático puede producirse un pequeño precipitado lechoso, que desaparece al agitar vigorosamente el envase.

◇ PRESENTACION

- Frasco rociador de 100 ml.