

DUO PLATE Human Blood Medium/ Agar Chocolate +Supl.

USOS: Aislamiento e identificación de Patógenos vaginales y *Gardnerella*

PRESENTACION: Duo-Plate Hb/Chocolate Placas dobles de 10 cm de diametro

Agar Chocolate

Medio extremadamente nutritivo , preparado a partir de base GC con adición de sangre de corde-ro calentada sobre 80°C para liberar la hemoglobi-na y entregar al medio todos los factores de creci-miento. Este medio está especialmente formulado para la investigación de:

Haemophilus influenzae y otros *Haemophilus*,
Streptococcus pneumoniae y otros fastidiosos

Medio Hb

Medio selectivo especialmente formulado para el desarrollo de *Gardnerella* , tiene como base el Agar Columbia, medio rico en nutrientes . Está adicionado de sangre humana al 10% y de inhibi-dores que suprimen el desarrollo del resto de la flora acompañante- La muestra debe tomarse con medio de transporte Amies de preferencia con carbón, después de efectuada la siembra se debe incubar en microaerofilia , en una atmósfera con 7% de CO₂ a 35°C por 48 hrs.

Gardnerella vaginalis es un bacilo corto pequeño pleomórfico de característica Gram -variable, que forma colonias pequeñas de 0,25 a 0,44 mm de diámetro, blancas transparentes y presentan hemólisis beta al contraluz-



Preparado segun especificaciones del fabricante
y segun norma ISO/TS11133-1:2000

CONTROL DE CALIDAD segun especificaciones
del standar ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.