



EMPRESA CON CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000

"Elaboración , Comercialización , y Distribución de Re-
activos y Productos Biológicos de Diagnóstico

DUO PLATE Agar Chocolate+Supl./Agar Sangre de Cordero al 5%

USOS: CULTIVO Y AISLAMIENTO DE GERMENES FASTIDIOSOS Y COCÁCEAS
GRAM-POSITIVAS

PRESENTACION: Duo Plate CV Placas dobles de 10 cm de diametro

Medio Agar Sangre de Cordero

Medio nutriente rico ,con adición de sangre de cordero desfibrinada al 5% y especialmente formulado para la diferenciación de cepas por la hemólisis producida por sus colonias. En este medio se deben investigar:

Staphylococcus aureus

Streptococcus Beta hemolitico

Corynebacterium vaginalis

Listeria monocytogenes.

Agar Chocolate

Medio extremadamente nutritivo , preparado a partir de base GC con adición de sangre de cordero calentada sobre 80°C para liberar la hemoglobina y entregar al medio todos los factores de crecimiento. Este medio está especialmente formulado para la investigación de:

Haemophilus influenzae y otros *Haemophilus*,

Streptococcus pneumoniae y otros fastidiosos



Preparado segun especificaciones del fabricante y segun norma ISO/TS11133-1:2000

CONTROL DE CALIDAD segun especificaciones del standar ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.

Conservación: De 4 a 8 °C hasta la fecha de vencimiento,

No congelar.