



Tecnología Biológica de Diagnóstico

EMPRESA CON CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000

"Elaboración , Comercialización , y Distribución de Re-
activos y Productos Biológicos de Diagnóstico

DUO PLATE Agar Mac Conkey + Agar Sangre de Cordero 5%

USOS: enumeración e identificación de microorganismos en orina

PRESENTACION: Duo Plate DJ Placas dobles de 10 cm de diametro

Medio Agar Sangre de Cordero

Medio nutriente rico ,con adición de sangre de cordero desfibrinada al 5% y especialmente formulado para la diferenciación de cepas por la hemólisis producida por sus colonias. En este medio se deben investigar:

Staphylococcus aureus

Streptococcus Beta hemolítico

Corynebacterium vaginalis

Listeria monocytogenes.

Agar Mac Conkey

Agar selectivo para el aislamiento de *Salmonellas Shighellas* y , bacterias coliformes. La adición al agar de sales biliares y cristal violeta inhibe el crecimiento de bacterias Gram-positivas .La lactosa y el rojo neutro como indicador proveen la identificación entre cepas fermentadoras y no fermentadoras de la lactosa:

E.coli -colonias rojas medio rojo.

Salmonellas -col.incoloras -med.amarillo

Shighellas -col.incoloras -med. amarillo



Preparado según especificaciones del fabricante y según norma ISO/TS11133-1:2000

CONTROL DE CALIDAD según especificaciones del estándar ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.

Conservación: De 4 a 8 °C hasta la fecha de vencimiento,

No congelar.