



EMPRESA CON CERTIFICACIÓN ISO  
9001:2000

"Elaboración , Comercialización , y Distribución de Re-  
activos y Productos Biológicos de Diagnóstico

## DUO PLATE Agar Lactosado CLED / Agar Mac Conkey

USOS: Enumeración y aislamiento primario de microorganismos en orina

PRESENTACION: Duo-Plate LM Placas dobles de 10 cm de diametro

### Agar Mac Conkey

Agar selectivo para el aislamiento de *Salmonellas Shighellas* y , bacterias coliformes. La adición al agar de sales biliares y cristal violeta inhibe el crecimiento de bacterias Gram-positivas .La lactosa y el rojo neutro como indicador proveen la identificación entre cepas fermentadoras y no fermentadoras de la lactosa:

*E.coli* -colonias rojas medio rojo.

*Salmonellas* -col.incoloras -med.amarillo

*Shighellas* -col.incoloras -med. amarillo

### Medio Cled

Medio vastamente usado para la enumeración y aislamiento de microorganismos en orina. Excelente medio para el desarrollo de todos los gérmenes encontrados en muestras de orina debido a su amplio espectro de nutrientes, además de permitir un cierto grado de diferenciación entre las colonias .Contiene lactosa y azul de bromotimol como indicador , por lo que las colonias de microorganismos fermentadores de lactosa viran al amarillo ;la alcalinización produce colonias azules , y además el medio controla la invasividad de las colonias de *Proteus*.



Preparado segun especificaciones del fabricante y segun norma ISO/TS11133-1:2000

**CONTROL DE CALIDAD** segun especificaciones del standar ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.

Conservación: De 8 a 12 °C hasta la fecha de vencimiento,

**No congelar.**